

Reinigungshinweise



Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zur Reinigung und Desinfektion der Pearltec Lagerungshilfen. Die Pearltec Lagerungshilfen bestehen aus PU-Folie und werden mittels Hochfrequenzschweissen hergestellt.

Dies gewährleistet:

- Eine hohe Strapazierfähigkeit
- Exzellente hygienische Oberflächen bei sachgemässiger Reinigung

Die Reinigungshinweise gelten für folgende Produktfamilien:

- BabyFix
- Crania
- CT Gantry Cover
- CT HeadFix
- CT Table Cover
- FoamFit
- MR Safety Pad
- Multipad
- PearlFit
- ProBelt
- ProFoam
- ProFoam Table Mat
- Sandbag

Reinigungsmittlempfehlung

Wirkstoff	Reinigungsmittel*	Konzentration*	Empfehlung
Wasser	Dest. Wasser	100%	geeignet
Tenside	Detergent	1%	geeignet
Alkohol	Isopropanol	50%	geeignet
Alkohol	Ethanol	80%	geeignet
Alkohole	Bacillol AF	100%	geeignet
Wasserstoffperoxid	Incidin OxyFoam	15%	nicht geeignet
Natrium Hypochlorit	Javel	1%	nicht geeignet
Hypochlorsäure	Hydroliq Prof.	0.05%	nicht geeignet
Benzalkoniumchlorid	Biguanid Fläche N	8%	geeignet

*Reinigungsmittel und Konzentration während Test

Test Methode

Zu jedem Reinigungsmittel wurden zwei Tests durchgeführt:

- Wipe-Test: Wiederholte Wischreinigung und anschliessende Trocknung der Folien
- Soak-Test: Einlegen der Folien in Reinigungsmittel

Nach den Tests wurden die Folien mechanisch und visuell geprüft.


Resultate

Reinigungsmittel, die als geeignet eingestuft werden, sind materialverträglich. Sie zeigten durch die Tests keine mechanische oder visuelle Beschädigung des Materials.

Reinigungsmittel mit Wasserstoffperoxid als Wirkstoff sind nicht geeignet, da es die PU-Struktur angreift. Reinigungsmittel mit Hypochlorit Verbindungen sind nicht geeignet, da sie zu Verfärbungen des Materials führen.

Weitere Reinigungs- und Desinfektionsanweisung

- A) Pearltec Produkte sind nach jedem Gebrauch mit einem empfohlenen Reinigungsmittel zu reinigen.
- B) Reinigen und desinfizieren Sie die gesamte Produktoberfläche gründlich, zum Beispiel mit vorgetränkten Desinfektionstüchern. Sprühen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Produkt. Sterilisieren Sie das Produkt nicht.
- C) ProFoam und ProBelt Produkte (ProBelt Thorax ausgeschlossen) können alternativ auch in einem Reinigungsbad gereinigt werden.
- D) Hinweise bezüglich Produktinformationen auf der Packungsbeilage des Reinigungsmittels beachten.
- E) Jodflecken reagieren mit der Polymerstruktur der PU-Folien und können durch Reinigungsmittel nicht entfernt werden.

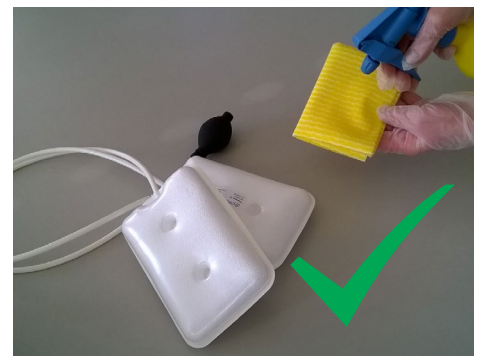

Bei Unsicherheit zur Verträglichkeit eines bestimmten Reinigungsmittels, gerne Anfrage an info@pearl-technology.ch richten.